

# ACE test 福澤愛斯®

滅菌バリデーション  
殺菌・除染効果判定用

ISO 9001:2000 認証工場  
ISO 13485:2003 認証工場

## ホルマリン燻蒸用バイオロジカルインジケーター (空間殺菌用)




芽胞ストリップ



培地

ホルマリン燻蒸用バイオロジカルインジケーターは *Bacillus atrophaeus* 菌種芽胞を塗布したストリップと専用培地が含まれています。ホルマリン燻蒸による病室内環境殺菌、製薬工場内殺菌・除染など様々な空間滅菌・殺菌用の生物学的指標です。

### 滅菌後・培養 48 時間

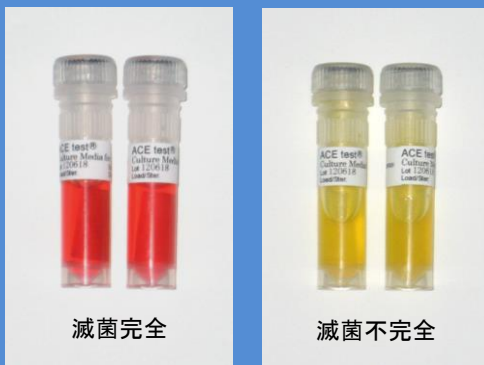

### 使用方法

1. 所定の箇所に芽胞菌袋を置き、滅菌をかけます。
2. 滅菌処理後、袋をクリーンベンチに持って行き、無菌状態で袋から芽胞キャリアを取り出し、培地の中に入れます。
3. 蓋を締め、専用の「ACE mini インキュベーター(品番:H8200)」にて 30~37°C で 48 時間を培養します。
4. 陽性コントロール: 滅菌処理をしていない芽胞菌袋から芽胞キャリアを取り出し、培地の中に入れ、同様にインキュベーターにて培養します。陽性コントロールは、使用毎に用いて下さい。

### 結果判定

**陰性** ⇒ 培地の色は赤色から変化なし ⇒ 滅菌完全

**陽性** ⇒ 陽性コントロールのように、培地の色変化あり(赤色から黄色) ⇒ 滅菌不完全

### 価格

品番	品名	芽胞数	用途	入数	価格
H6307-3	ホルマリン燻蒸用 生物学的指標	1×10 <sup>3</sup> 以上	病室内環境表面殺菌、製薬工場内除染など	100 セット/箱	¥34,500
H6307-4		1×10 <sup>4</sup> 以上			
H6307		1×10 <sup>6</sup> 以上			

※消費税別途 ※H6307-3、-4 は受注生産

# ACE mini エースミニ

## ACE mini INCUBATOR

### バイオロジカルインジケータ専用インキュベーター



最新式プログラムマイクロプロセッサコントロールを搭載した液晶画面付きブロックインキュベーターです。

#### 機能特長

- 手のひらにおさまる大きさのコンパクトサイズ。
- 読みやすいLCD 液晶表示。
- プログラム機能を内蔵。温度と時間を最大9種類組み合わせ可能。
- マイクロプロセッサコントロールにより、正確・均一な温度制御を実現。
- 1分～99時間59分のタイマー機能付きで、インキュベーション終了をブザーで報知。
- 故障を自動検出しブザーで報知。
- 温度校正機能付き。
- アルミ製ブロックを腐食防止加工。
- 電力消費が少ないエコタイプ。
- CE 規定の安全規定を遵守。

#### 仕様

使用温度範囲	室温+5℃～80℃
温度上昇時間	6分以内(20℃→56℃)
温度精度	±0.5℃
設定時間	1分～99時間59分
表示単位	0.1℃
サーモブロック材質	アルミニウム
機器動作環境	5℃～35℃
外形寸法	W110mm×D150mm×H80mm
重量(ブロック含む)	0.5kg
消費電力	最大:35W、平均:5W
電源	AC100~240V、50/60Hz、80VA



#### 価格

品番	品名	孔数	価格
H8200	ACE mini インキュベーター	15孔(孔径:10.5mm)	¥69,800

※消費税別途

製造元 上海福沢医薬器材有限公司

<http://www.fzme.com/>

発売元 福沢商事株式会社

〒233-0013 横浜市港南区丸山台 2-36-30

Tel: 045-845-2699 Fax: 045-845-2889

E-mail: [t.fukuzawa@s8.dion.ne.jp](mailto:t.fukuzawa@s8.dion.ne.jp)